


KLETON


MP995 CHARIOT UTILITAIRE

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE




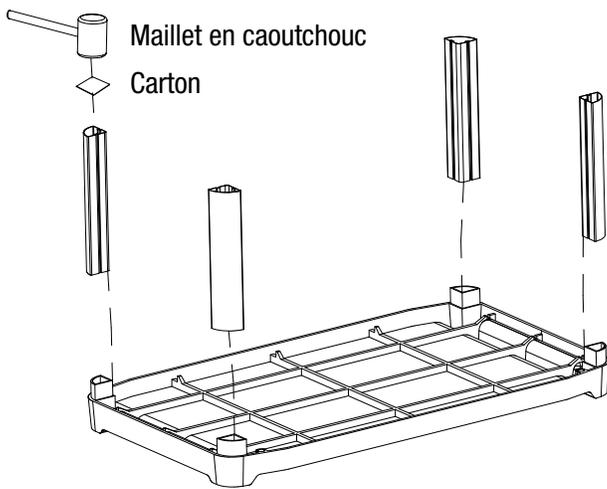


ÉTAPE 1: Insérer les tubes en aluminium dans les trous du côté inférieur de la tablette supérieure à l'aide d'un maillet en caoutchouc.

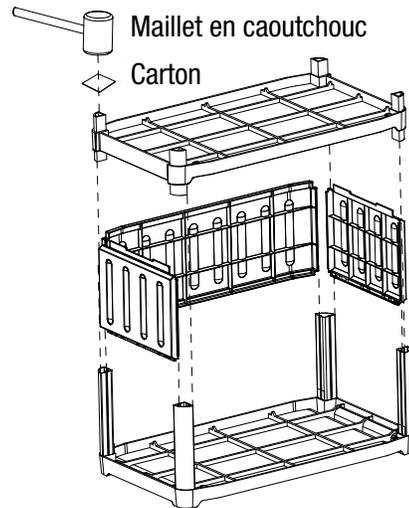


ÉTAPE 2: Insérer les panneaux courts (2) et le panneau long (1) dans les rails des tubes en aluminium. Placer la tablette centrale avec le côté plat vers le bas et la marteler dans les tubes en aluminium. (Voir figure)

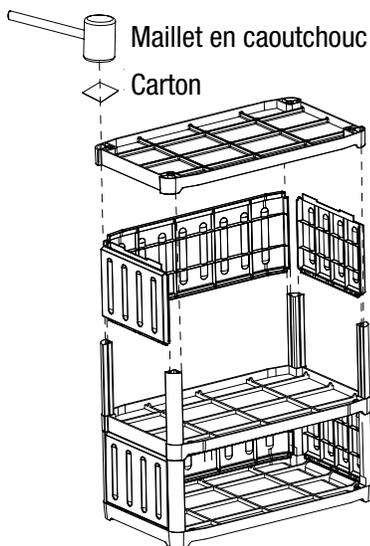

ÉTAPE 3: Répéter les étapes 1 et 2 avec les autres tubes, la tablette et les panneaux latéraux supérieure du chariot sur les tubes en aluminium et enfoncez-les en place à l'aide d'un marteau (voir ci-haut).

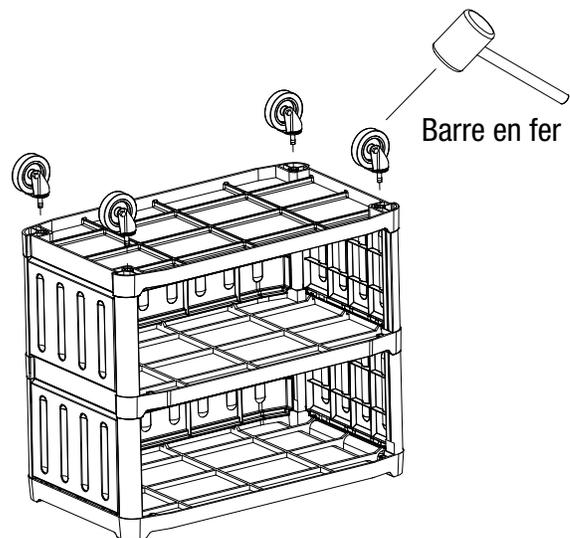

ÉTAPE 4: Placer les roulettes pivotantes dans les trous prévus à cet effet sur le fond du chariot utilitaire et les fixer à l'aide du maillet.

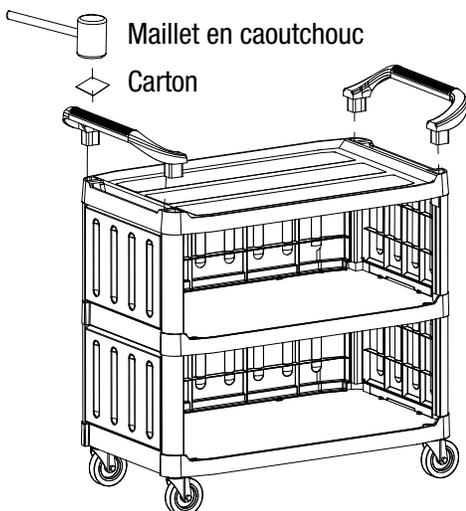

ÉTAPE 5: Relever le chariot utilitaire et installer les poignées à l'aide d'un maillet en caoutchouc en tapant légèrement sur la poignée dans les trous prévus à cet effet sur le dessus du chariot.



ÉTAPE 6: Assemblage complet.